


Brug af Urinanalyse apparat

Kontakt

1 Vælg *Strip Test* på skærmen



2 Tryk på *START* på skærmen

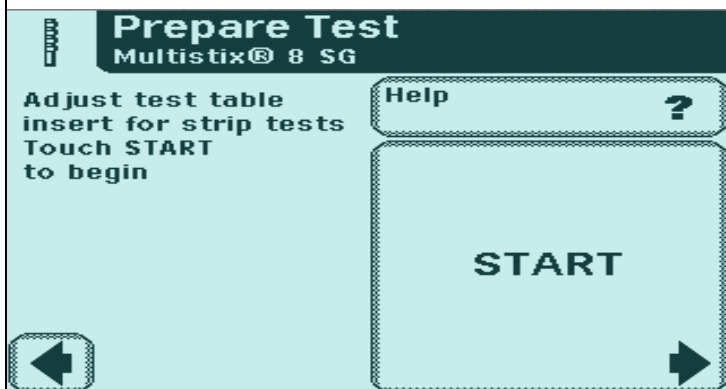

3 Indenfor **8 sekunder** gøres følgende:

1. Dyp en urinstix hurtigt i urinprøven.
2. Tør kanten af urinstix'en imod en serviet.
3. Placér stixen på slædeindsatsen




4

Slæden trækkes automatisk ind i apparatet efter 8 sekunder.



5 Aflæs resultatet, og rapporter på Tablet.

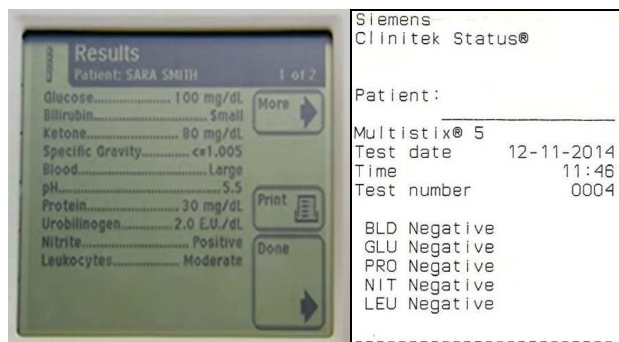

6 Tør slædeindsatsen ren med en sprit serviet eller lignende.



- a. Du må ikke berøre felterne på urinstix'en.
- b. Det er vigtigt at du lægger urinstix'en helt ind til den bagerste kant i slæden.
- c. Du må ikke skubbe slædeindsatsen ind. Slædeindsatsen kører automatisk ind efter 8 sekunder.
- d. Når målingen er færdig vises resultatet på skærmen, og en rapport skrives ud på papir.
- e. Tryk *DONE*, på skærmen, når du er færdig.