

linkwatch

Brug af iltmætningsmåler

Kontakt

1 Sæt batterierne ind i underdelen



2 Monter overdelen ovenpå batterierne



3 Skub overdelen ind over underdelen



4 Åben overdelen og stik fingeren ind



5 Vent til målingen vises i displayet



6 Apparatet slukker selv



- Ved batteriskifte skal apparatets Bluetooth muligvis parres med pc'en igen.
- Varm fingeren ved at gnide den kraftigt mod din hånd og stik fingeren ind i apparatet.
- Apparatet tænder selv, når du løfter overdelen. Det er ikke nødvendigt at trykke overdelen ned på fingeren.
- Hold fingeren i ro under målingen. Lampen blinker grønt, når der er foretaget en korrekt måling.
- Displayet viser iltmætningen af blodet samt pulsen. Bemærk at displayet vender væk fra dig selv.
- Hvis data ikke modtages på pc'en, så gå tættere på. Vær aldrig mere end 10 meter væk fra monitoren.