

Justering til lille manchet

Kontakt

❶ Mål mindst 2 gange med alm. manchet



❷ Fjern den sorte mærkat på bagsiden



❸ Drej skruen 1/4 omgang mod uret



❹ Monter den lille manchet i apparatet



❺ Mål blodtrykket med den lille manchet



❻ Påsæt sort mærkat og mærk apparatet



- Af hensyn til den automatiske oppumpning, måles først to gange med alm. manchet til det forventede blodtryk hos patienten. Derved nulstilles tidligere gemte værdier i apparatet.
- Kontroller at slangen til den lille manchet sidder helt inde i apparatets slangebøsning. Den kan være lidt stram.
- Husk en tydelig mærkning af apparatet så det kun vil blive brugt med den lille manchet.
- Når apparatet skal tilbagesendes til alm. manchet følges samme procedure som ovenfor, idet dog skruen drejes ¼ omgang med uret. Husk at fjerne mærkningen bagefter.